


Reglage, indikatorer och etiketter

I detta avsnitt beskrivs enhetens reglage, indikatorer och etiketter.

Utvändiga reglage, indikatorer och etiketter


Reglage, indikatorer och etiketter på utsidan av defibrillatorn beskrivs nedan.

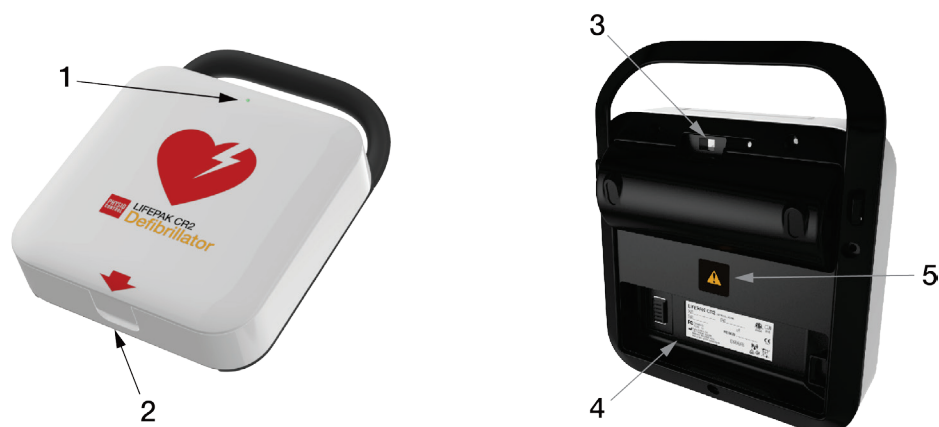

DEL	FUNKTION	BESKRIVNING
1	Beredskapsindikator	Denna gröna LED-lampa blinkar var 6:e sekund om defibrillatorn är klar för användning. Indikatoren lyser med fast sken om defibrillatorn är på, och är släckt om defibrillatorn kräver uppmärksamhet. Om beredskapsindikatorn är släckt ska du omedelbart följa anvisningarna i Upprätthålla beredskap (på sida 77) för att avgöra vad det är för fel. Om problemet är svagt batteri ska du sätta i ett nytt batteri snarast möjligt för att undvika effektförlust under patientvård. Obs! När beredskapsindikatorn är släckt hörs en ljudsignal var 15:e minut. Varningssignalen kan stängas av. Se Inställningsalternativ (på sida 101) för mer information.
2	Öppning	Öppna defibrillatorn genom att dra locket uppåt vid pilen.
3	USB-port	USB-anslutningen används för att ansluta defibrillatorn till en dator och upprätta kommunikation med LIFELINKcentral AED-programhanterare eller LIFENET System. USB-anslutningen behövs också för att specificera Wi-Fi-inställningarna så att defibrillatorn får åtkomst till Wi-Fi-nätverket. Se LIFELINKcentral AED-programhanterare (på sida 43) eller LIFENET-system (på sida 59) för mer information.
4	Batterifack	Sätt i LIFEPAK CR2 litiumbatteri i batterifacket tills det klickar på plats. Etiketten med serienumret sitter i batterifacket. För att se serienumret ska batteriet tas ut.
5	Varningssymbol	Se Allmänna risker och varningar (på sida 19) för viktig information.

Invändiga reglage och funktioner

Reglage och funktioner inuti defibrillatorn visas nedan.

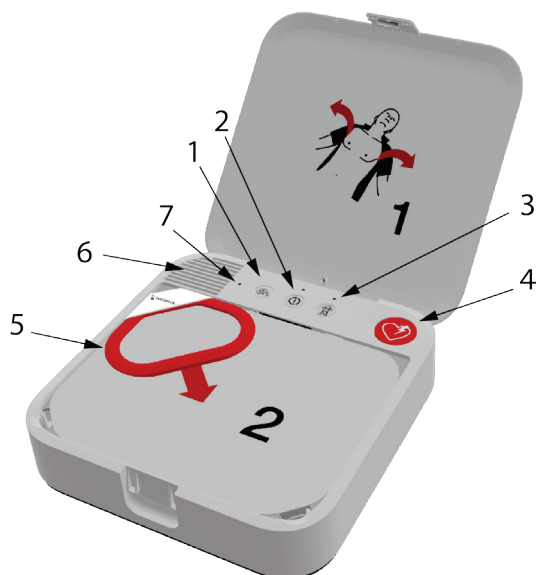

DEL	FUNKTION	BESKRIVNING
1	SPRÅK -knappen	Om defibrillatorn har två språk installerade, tryck på knappen SPRÅK för att växla mellan dessa språk. Obs! För att växla till dataläge och komma åt vissa underhållsfunktioner ska du samtidigt hålla de båda knapparna SPRÅK och BARNLÄGE intryckta i minst 2 sekunder. För mer information, se Upprätthålla beredskap (på sida 77)
2	PÅ/AV -knapp	Defibrillatorn startar automatiskt när locket öppnas. Tryck och håll knappen PÅ/AV intryckt i 3 sekunder för att stänga av defibrillatorn. Tryck igen för att starta defibrillatorn igen. Den gröna LED-lampan lyser när defibrillatorn är på. Obs! Knappen PÅ/AV är inaktiverad när elektrodplattorna är placerade på en patient.
3	BARNLÄGE -knappen	Tryck på knappen BARNLÄGE för att växla mellan lägena Vuxen och Barn. När Barnläge är valt lyser den gröna LED-lampan ovanför knappen BARNLÄGE och röstmeddelandet "Barnläge" hörs.
4	CHOCK -knappen/indikatorn	På helautomatiska defibrillatorer blinkar indikatorn DEFIBRILLERING när defibrillatorn förbereder sig för att avge en defibrillering. På halvautomatiska defibrillatorer ska du trycka på den blinkande knappen DEFIBRILLERING för att ge patienten en defibrillering.
5	Rött handtag	Under ett hjärtstillestånd, dra i det röda handtaget för att få fram elektroderna. VIKTIGT! Dra endast i det röda handtaget i en akutsituation. Om du drar i det röda handtaget bryts elektrodförseglingen och elektroderna kommer att torka ut. Om förseglingen är bruten ska elektrodförpackningen omedelbart bytas ut och den öppnade elektrodförpackningen kasseras enligt beskrivningen i Information om återvinning (på sida 84).

DEL	FUNKTION	BESKRIVNING
6	Högtalare	Ger röstinstruktioner och ljudsignaler.
7	Ljudsensor	Ljudsensorn övervakar brusnivån i omgivningen medan defibrillatorn används. Defibrillatorn justerar sedan automatiskt ljudvolym på röstinstruktionerna så att de hörs ordentligt.

Använda defibrillatorn

I detta avsnitt finns information och instruktioner om hur man använder defibrillatorn på en patient med hjärtstillestånd.

Varningar och försiktighetsanvisningar	35
Behandling av en patient som har plötsligt hjärtstillestånd	36
Övriga utbildningsresurser	40
Felsökningstips	40

Varningar och försiktighetsanvisningar

Gör dig väl förtrogen med nedanstående varningar och försiktighetsanvisningar, så att du kan använda defibrillatorn på ett säkert sätt.

VARNING

Risk för elektrisk stöt

När du får instruktionen **RÖR INTE PERSONEN**, vidrör inte defibrillatorn, patienten, elektrodplattorna eller något material eller vätska som är i kontakt med patienten. Kontrollera att ingen rör patienten när defibrillatorn levererar defibrilleringen till patienten.

VARNING

Risk för brand, brännskador och ineffektiv energileverans

Material som är i kontakt med elektroderna under defibrillering kan ge elektriska gnistor, brännskador på huden och avleda viktig defibrilleringsenergi från hjärtat. Placera elektroderna så att de fäster fullständigt mot huden. Elektroderna får inte röra varandra, medicinska plåster, förband, metallföremål, andra elektroder eller något annat material på patientens bröst.

VARNING

Risk för elektrisk stöt

Rör inte samtidigt vid patienten och USB-anslutningen på enhetens baksida.

VARNING

Risk för brännskador på huden

Vid defibrillering kan luftfickor mellan huden och elektroderna orsaka brännskador på huden. Förebygg luftfickor genom att se till att elektroderna sitter ordentligt fast på huden. Använd inga skadade, utgångna eller uttorkade elektroder.

VARNING

Risk för brännskador och ineffektiv energileverans

Elektroder som är uttorkade eller skadade kan orsaka elektriskt överslag och brännskador på patientens hud vid defibrillering. Dra inte i det röda handtaget för att öppna elektroderna förrän precis innan de ska användas.

VIKTIGT

Möjlig utrustningsskada

Koppla bort all utrustning som inte är defibrillatorskyddad från patienten innan defibrillatorn används.

Behandling av en patient som har plötsligt hjärtstillestånd

Utan behandling leder plötsligt hjärtstillestånd till döden. Det är viktigt att komma ihåg att omedelbart tillkalla hjälp och sätta igång ditt akuträddningssystem.


När du öppnar defibrillatorn ger röstinstruktionerna tydliga steg-för-steg-instruktioner för behandling av en patient som har hjärtstillestånd. Se Röstinstruktioner (på sida 95) för en fullständig lista över röstinstruktioner.

Grundläggande steg för att använda LIFEPAK CR2-defibrillatorn

Behandlingen av en patient med hjärtstillestånd med defibrillatorn omfattar tre grundläggande steg:



- 1 Klappa patienten på axeln och ropa. En person med hjärtstillestånd reagerar inte.

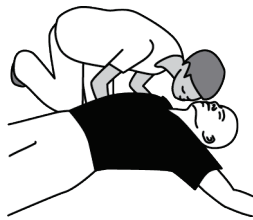


- 2 Kontrollera om patienten andas genom att lyssna nära munnen och titta efter om bröstkorgen rör sig. Använd endast defibrillatorn om patienten inte reagerar och inte andas eller endast flämtar. Använd defibrillatorn om du är tveksam.



- 3 Placera defibrillatorn nära patienten på den sida du befinner dig. Öppna locket för att starta defibrillatorn. Defibrillatorn leder dig genom lämpliga steg.

Obs! Tryck på knappen **PÅ/AV** om defibrillatorn inte startar eller om locket saknas.

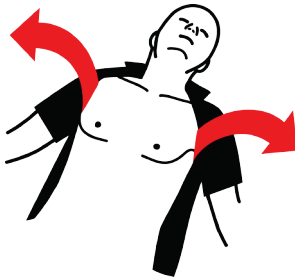

- 4 Avlägsna alla kläder, inklusive underkläder, från patientens bröstkorg. Om patienten har mycket hår på bröstet och det finns en rakhyvel tillgänglig, raka snabbt bort håret där du ska placera elektroderna. Om patienten är smutsig eller våt på bröstet, torka bröstet rent och torrt. Om det finns medicinplåster på bröstet ska dessa tas bort.



- 5 Om defibrillatorn är av en modell med dubbla språk hörs nu ett röstmeddelande på det andra språket. Detta röstmeddelande instruerar dig att trycka på knappen **SPRÅK** för att växla till det andra språket (om så önskas).



- 6 Om patienten är ett barn under 8 år eller väger mindre än 25 kg, tryck på knappen **BARNLÄGE** för att växla till Barnläge. För att återgå till Vuxenläge trycker du på knappen **BARNLÄGE** igen.
Obs! I Japan rekommenderas Barnläge för barn under 6 år.



- 7 Dra i det röda handtaget för att få fram elektroderna.



- 8 Dra i öglorna på elektrodplattorna för att dra loss plattorna från brickan.




- 9 Sätt fast elektroderna på patientens bara bröst exakt som på bilderna på elektroderna. Undvik om möjligt att placera elektroderna över skadad hud. Tryck hårt så att elektroderna fäster ordentligt på patientens bröst.

Obs! Se till att du inte placerar elektroderna över en implanterad enhet som en pacemaker eller en ICD. Ett tecken på en implanterad enhet är om det finns ett ärr och en bit som sticker ut på bröstkorgen. Placera elektroderna som på bilderna om du är osäker.

Obs! Se till att elektroderna är minst 2,5 cm från varandra. Om patientens bröstorg är för liten ska elektroderna placeras på bröstet och ryggen på det sätt som visas på barnbilderna på elektroderna.



- 10 Lyssna på röstinstruktionerna och rör inte patienten om du inte får instruktioner om att göra det.

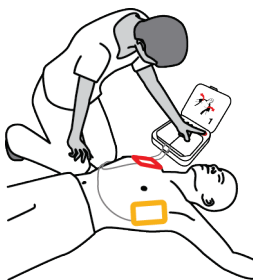


- 11 Om defibrillatorns hjärtrytmanalys avgör att en stöt behövs kommer du att höra meddelandet **RÖR INTE PERSONEN**, följt av ett av följande två alternativ.
- Om du har en halvautomatisk modell hörs **TRYCK PÅ BLINKANDE KNAPP NU**. Tryck på den blinkande knappen **DEFIBRILLERING** för att ge en defibrillering.
 - Om du har en helautomatisk modell hör du **RÖR INTE PERSONEN**, följt av **DEFIBRILLERAR**. Defibrillatorn defibrillerar automatiskt utan ytterligare åtgärd.

- 12 Rör inte vid patienten då defibrillering levereras. Oberoende av vilken modell du har ska du sedan följa röstinstruktionerna.



- 13 Defibrillatorn kommer att instruera dig att börja med hjärtkompressioner. Defibrillatorn kommer att ge instruktioner om hur händerna ska placeras under hjärtkompressionerna och avge tickande ljud i korrekt kompressionshastighet. Du kan också få instruktioner att ge konstgjord andning, beroende på inställningarna i defibrillatorn.

Obs! Ta inte bort elektroderna från patientens bröstkorg under bröstkompressionerna.

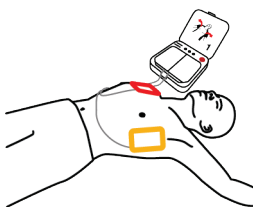


- 14 Fortsätt att följa röstinstruktionerna och ge bröstkompressioner när du får instruktioner om detta tills något av följande inträffar:
- Patienten börjar andas regelbundet eller röra sig
 - Akutvårdspersonal anländer och säger åt dig att sluta.

Ta inte bort elektroderna eller koppla inte bort dem från defibrillatorn förrän akutvårdspersonalen säger åt dig att göra det.

Särskilda anvisningar för användning på småbarn

Om patienten är ett mycket litet barn eller spädbarn ska elektroderna placeras på bröstkorgen och ryggen på det sätt som visas nedan. Elektroderna måste placeras så att de inte vidrör varandra. Illustrationer som visar denna placering finns också på elektroderna för snabb referens under användningen.

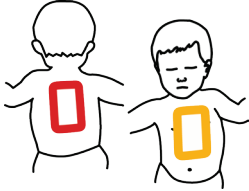

Vad du ska göra när akutvårdspersonal har kommit fram

När akutvårdspersonal kommer, fortsätt med HLR tills de säger åt dig att sluta. Tala om vad du har gjort, hur länge patienten har varit medvetslös, om du har levererat defibrillering samt antalet defibrilleringar levererade.

Oroa dig inte om du inte kommer ihåg precis vad som hände. Defibrillatorn registrerar hjärtrytmen, antalet defibrilleringar och andra data som kan överföras till medicinsk personal under insatsen eller efteråt. Kontakta lokal representant för Physio-Control eller lokal auktoriserad distributör för att få hjälp med dataöverföring.

Akutvårdspersonalen kan kanske koppla bort elektroderna från defibrillatorn och ansluta dem till en annan defibrillator med kompatibel kabel. För att koppla bort elektroderna drar man elektrodkabeln rakt ut från defibrillatorn och stänger locket för att stänga av defibrillatorn.

Vad du ska göra efter att du har använt defibrillatorn

När du har använt defibrillatorn för att behandla ett hjärtstillestånd ska du göra så här:

1. Om defibrillatorn är påslagen ska du trycka på knappen **PÅ/AV** och hålla den intryckt i cirka 3 sekunder för att stänga av den.
2. Rengör defibrillatorn och dess tillbehör enligt anvisningarna i Rengöring av defibrillatorn (på sida 83). Använd endast angivna rengöringsmedel.
3. QUIK-STEP-elektrodförpackningen måste bytas ut när den har öppnats, även om elektroderna inte har använts. Om du inte har någon extra elektrodförpackning, kontakta en representant för Physio-Control eller lokal auktoriserad distributör för att beställa en ny elektrodförpackning.
4. När den nya elektrodförpackningen kommer installerar du den enligt anvisningarna i Byte av elektroder (på sida 79).
5. Stäng locket och kontrollera att beredskapsindikatorn blinkar var 6:e sekund.

Obs! Om beredskapsindikatorn inte blinkar, öppna locket. När röstinstruktionerna startar, tryck och håll in knapparna **SPRÅK** och **BARNLÄGE** samtidigt i minst 2 sekunder tills du hör **ENHETEN ÄR REDO** eller **ENHETEN ÄR INTE REDO**. Defibrillatorn kommer att lämna röstinstruktioner för att hjälpa dig hitta felet. Se Skötsel av defibrillatorn (på sida 75) för mer information.

6. Kassera den använda elektrodförpackningen enligt anvisningarna i Information om återvinning (på sida 84).

Övriga utbildningsresurser

Physio-Control rekommenderar att alla identifierade defibrillatoranvändare får genomgå formell HLR- och AED-utbildning, anordnad av en erkänd utbildningsorganisation. Denna utbildning bör upprepas vartannat år.

Utbildningsvideor för LIFEPAK CR2-defibrillatorn finns på Physio-Controls webbplats www.physio-control.com. I dessa korta videor finns information om hur man använder och underhåller defibrillatorn.

Physio-Control erbjuder en träningsenhet för att underlätta träningssimuleringar. LIFEPAK CR2-tränaren simulerar LIFEPAK CR2-defibrillatorn, men ger ingen defibrillering. Denna tränare rekommenderas så att användarna kan öva på att använda LIFEPAK CR2-defibrillatorn i simulerade hjärtstilleståndssituationer.

VIKTIGT! Använd inte LIFEPAK CR2-defibrillatorn till träning. Att göra detta minskar batteriladdningen och kan skada elektroderna.

Kontakta en lokal representant för Physio-Control eller en lokal behörig distributör för att beställa LIFEPAK CR2-tränaren. Se den kontaktlista för kundsupport som medföljer enheten för regionspecifika telefonnummer.

Felsökningstips

I detta avsnitt förklaras problem som du kan träffa på under användningen av defibrillatorn.

OBSERVATION	MÖJLIG ORSAK	KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Röstmeddelandet KONTROLLERA SÅ ATT ELEKTRODERNA HAR GOD KONTAKT MED DEN BARA HUDEN eller KONTROLLERA ANSLUTNINGEN TILL ELEKTRODFÖRPACKNINGEN hörs	Elektroderna sitter inte ordentligt fast på patientens bara hud Dålig anslutning till defibrillatorn	• Tvätta, raka och torka patientens hud innan du placerar elektroderna på huden • Tryck fast elektroderna ordentligt på patientens hud • Kontrollera att elektrodförpackningen har förts in helt i defibrillatorn
Defibrillatorn kan inte leverera den defibrillering som behövs	Svagt batteri	• Ge HLR
Röstinstruktionerna är svaga eller förvrängda	Svagt batteri Fel på högtalarsystemet	• Följ röstinstruktionerna om möjligt. • Ge HLR • Kontakta kvalificerad servicepersonal.

OBSERVATION	MÖJLIG ORSAK	KORRIGERANDE ÅTGÄRD
Röstmeddelandet PERSONEN EJ STILLA, STILLA PERSONEN hörs	Patienten vidrörs Patienten rör sig på grund av andning Elektrisk störning/radiofrekvensstörning	- Rör inte vid patienten. - Kontrollera om patienten andas normalt - Flytta om möjligt bort kommunikationsenheter eller andra misstänkta enheter från defibrillatorn.
Defibrillatorn avger inga röstinstruktioner eller pipsignaler när du öppnar den (startar den)	Urladdat batteri Fel på högtalarsystemet	- Byt ut batteriet omedelbart. Om det inte finns något i reserv, beställ ett nytt batteri med en gång - Kontakta kvalificerad servicepersonal.
Beredskapsindikatorn blinkar inte	Svagt batteri eller utgångna elektroder Urladdat batteri Elektrodförpackningen är inte ansluten Driftstemperaturen är för låg eller för hög Defibrillatorns självtest blev inte godkänt	- Öppna locket. När röstinstruktionerna börjar, tryck och håll nere knapparna SPRÅK och BARNLÄGE samtidigt i minst 2 sekunder. Defibrillatorn kommer att lämna röstinstruktioner för att hjälpa dig hitta felet - Byt ut batteriet omedelbart. Om det inte finns något i reserv, beställ ett nytt batteri med en gång - Kontrollera att elektrodförpackningen har förts in helt i defibrillatorn - Använd defibrillatorn mellan 0 °C och 50 °C - Kontakta kvalificerad servicepersonal.